

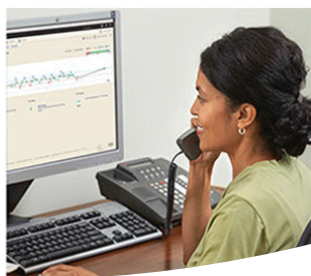


# Legyen összekapcsolva saját betegeivel!

Kövesse diabéteszes pácienseinek adatait.  
Bárhol, bármikor.

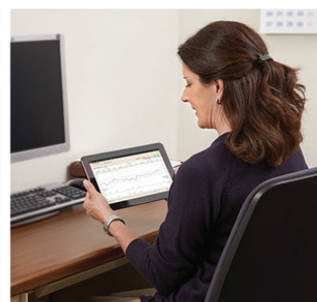

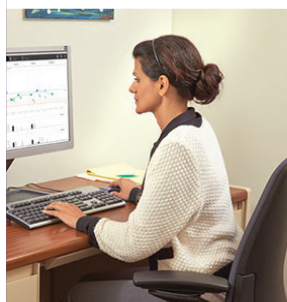

## Hány hasonló problémával találkozott már Ön is?



A páciensek sokszor nem motiváltak a cukorbetegség kezelésével kapcsolatban.



A betegeitől hiányos, vagy pontatlan vércukor-adatokat kap.



A vizitek közt időnként szüksége lenne a betegek bizonyos adataira, de ezekhez nem fér hozzá.



Rengeteg adata van a páciensekről, de nagyon időigényes ezek elemzése.

## Az Accu-Chek Connect Online diabéteszmenedzsment rendszer bemutatása

Az Accu-Chek Connect Online rendszer egy online eszköz, amely segítségével a cukorbetegek gyakorlatilag bárhol és bármikor, biztonságosan megoszthatják kezelőorvosukkal a cukorbetegséggel kapcsolatos adataikat, így például a vércukorszintet, a bevitt szénhidrát mennyiségét és a beadott inzulin dózisokat.

Az egészségügyi szakemberek és cukorbetegek számára létrehozott, felhő alapú tárhellyel rendelkező, online portál segítségével Ön és betegei azonos információkhoz férhetnek hozzá valós időben.


- A könnyen hívható jelentések segítségével **egyszerűen azonosíthatók a glikémiás problémák**, így segítve a terápia beállítását<sup>1</sup>
- A súlyos glikémiás problémákkal küzdő pácienseket kiemelten kezelheti
- A betegek által megosztott adatok megtekintéséhez **nem szükséges külön adatmegosztó program** használata
- Ön és a gondozó team **bárhol és bármikor hozzáférhetnek a betegek adataihoz**

# Az Accu-Chek Connect Online segítségével rövidebb idő alatt szűrheti ki az információkat<sup>1</sup>

A cukorbetegek gyakran füzetben vezetik a vércukorértékeiket, aminek hátrányai lehetnek:

- a kézzel írt jegyzetekben gyakori a hiba és a mulasztás<sup>2</sup>
- a páciensek gyakran elfelejtik elhozni a naplójukat az orvosi vizitekre<sup>3</sup>
- a vércukorértékeknek csak a felét lehet pontos mérésenként értékelni<sup>4</sup>

Az Accu-Chek Connect Online Jelentési Program és Hatékonysági Tanulmány (ACCRUES) összehasonlította azon betegek, egészségügyi szakemberek papíralapon és elektronikusan vezetett napló adatait, akik korábban kizárólag papír alapú diabétesznaplót használtak:

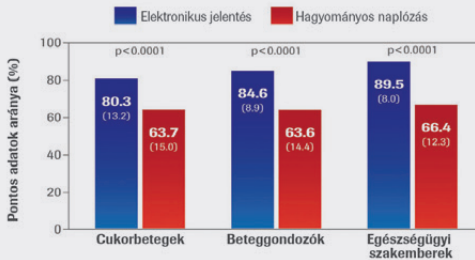


## Eredményes

Javult a kulcsinformációk felhasználásának aránya.<sup>1</sup>

## Hatékony

Csökkentette az önellenőrzés eredményeire és a glikémiás minták elemzésére fordított időt.<sup>1</sup>

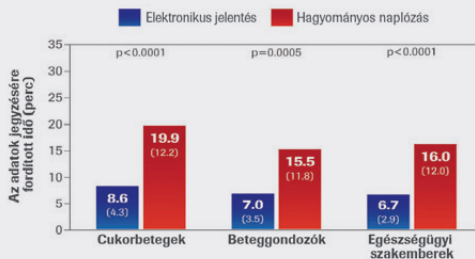

## Megnyerő

Az elektronikus jelentések megkönnyítik és optimalizálják a betegekkel történő konzultációt.<sup>1</sup>



## Telepítés előtt

### Rendszerkövetelmények

Néhány hasznos tanács és információ az Accu-Chek Connect Online fiók beállításához. A telepítés előtt ellenőrizze, hogy rendelkezik-e a szükséges feltételekkel.

#### Biztosítson hozzáférést

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Elsődleges fióktulajdonos | <input type="checkbox"/> Rendszer jelszó           |
| <input type="checkbox"/> IT Adminisztrátori jogok  | <input type="checkbox"/> USB port (adatátvitelhez) |


#### Adja meg az alapértelmezett böngészőt\*

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Internet Explorer | <input type="checkbox"/> Safari |
| <input type="checkbox"/> Microsoft Edge    | <input type="checkbox"/> Chrome |
| <input type="checkbox"/> Firefox           |                                 |

\*Alapértelmezett böngésző, amit az **accu-chekconnect.com** parancsikon és az Eszköz Link alkalmazásokhoz beállított. A rendszer a támogatott böngészők 32 bites verzióján fut.

#### Támogatott Operációs Rendszerek

- Apple/Mac OS 10.8 vagy frissebb
- Microsoft Windows 7 (32 bit) vagy frissebb
- Microsoft Windows Vista SP2 (32 bit)

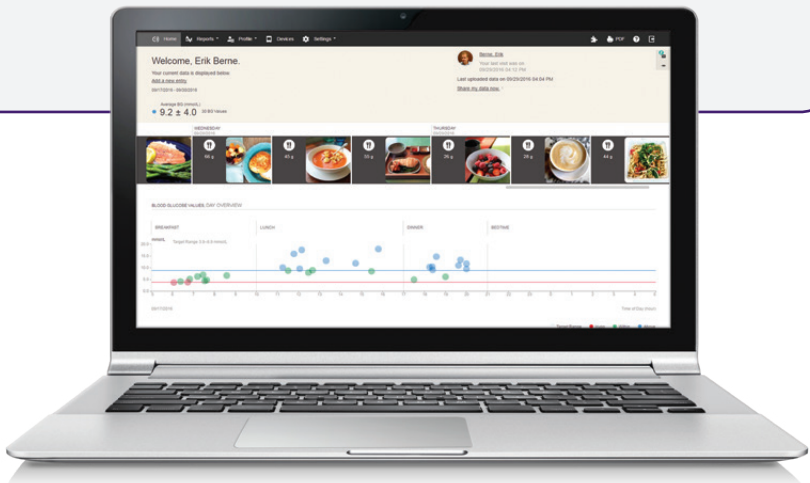



## Hozzon létre egy Accu-Chek Connect Online fiókot

1. Keresse fel az **accu-chekconnect.com**-ot.
2. Válassza ki az **országot**.
3. Válassza ki: Fiók Létrehozása/Egészségügyi Szakember.
4. Töltse ki a regisztrációs oldalt és adjon meg egy **Rendelői fiók** nevet.
5. Fogadja el a **Használati és Licencfeltételeket**, amennyiben azokkal egyetért.

### Fiók létrehozása

Ön új felhasználó és még nincs fiókja? A regisztrációhoz kattintson az alábbi gombra.

-  Egészségügyi szakember
-  Beteg

REGISZTRÁCIÓ MEGKEZDÉSE



A Rendelői fiók név egyedi azonosítónak szolgál. A Rendelői fiók nevet meg kell adnia pácienseinek, ezért javasoljuk, hogy egyszerűen megjegyezhető legyen.

#### Rendelői fiók neve >

- i** A felhasználónév hossza 5 és 255 karakter között lehet és a következők egyikének teljesülnie kell: csak betűket és számokat tartalmazhat szóköz nélkül, VAGY érvényes e-mail-címnek kell lennie.



## További információ: Felhasználói fiókok és szerepkörök

A fiók létrehozása után különböző szerepköröket adhat a munkatársainak. Ez határozza meg a felhasználók hozzáférését. Háromféle szerepkör közül választhat:

**Felhasználó (U)** megnézhet, szerkeszthet, hozzáadhat, vagy törölhet páciens adatot; elfogadhatja az adatmegosztási kérelmeket; riportokat készíthet

**Adminisztrátor (A)** a felhasználói szerepkörökön túl hozzáadhat, törölheti és szerkesztheti a Felhasználói és Adminisztrátori fiókokat

**Tulajdonos (O)** A felhasználói és adminisztrátori szerepkörökön túl megnézheti és szerkesztheti a fiókbeállításokat, felhasználói nevet és törölheti a fiókot

| Név   | E-mail cím | Felhasználói név | Jog   |
|-------|------------|------------------|-------|
| _____ | _____      | _____            | U A O |
| _____ | _____      | _____            | U A O |
| _____ | _____      | _____            | U A O |
| _____ | _____      | _____            | U A O |
| _____ | _____      | _____            | U A O |
| _____ | _____      | _____            | U A O |
| _____ | _____      | _____            | U A O |
| _____ | _____      | _____            | U A O |
| _____ | _____      | _____            | U A O |
| _____ | _____      | _____            | U A O |
| _____ | _____      | _____            | U A O |
| _____ | _____      | _____            | U A O |
| _____ | _____      | _____            | U A O |
| _____ | _____      | _____            | U A O |
| _____ | _____      | _____            | U A O |
| _____ | _____      | _____            | U A O |

Új fiók létrehozásánál szükség van a felhasználók beleegyezésére és egy aktiváló kóddal kell megerősíteniük az e-mail címüket. A fiók aktiválása után a rendszer visszaigazoló e-mailt küld, ideiglenes jelszóval. A felhasználóknak az első bejelentkezésnél meg kell változtatniuk jelszavukat az [www.accu-chekconnect.com](http://www.accu-chekconnect.com)-on.


## Kapcsolódjon pácienseihez

Hozzáférhet a páciensek vércukoradataihoz, ha meghívja őket, vagy, ha elfogadja az adatmegosztási kérelmüket.



### 1. Meghívó küldése egy páciensnek


#### Új páciens meghívása:

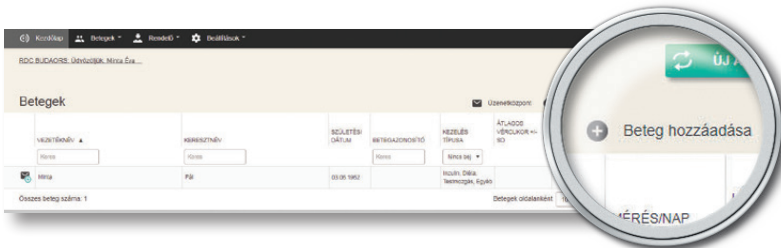1. Kattintson a *Beteg Hozzáadása* gombra.
2. Adja meg a páciens adatait.
3. A meghívó küldéséhez kattintson a jelölőnégyzetre, majd a *Mentés* gombra.



#### Létező páciens meghívása:

1. Kattintson a páciens neve mellett található *Páciens Meghívása* ikonra .
2. Adja meg a páciens e-mail címét.
3. Kattintson a *Küldés* gombra. A főoldalon található ikon *"Függőben"*-re változik , amíg a páciens el nem fogadja a meghívást.

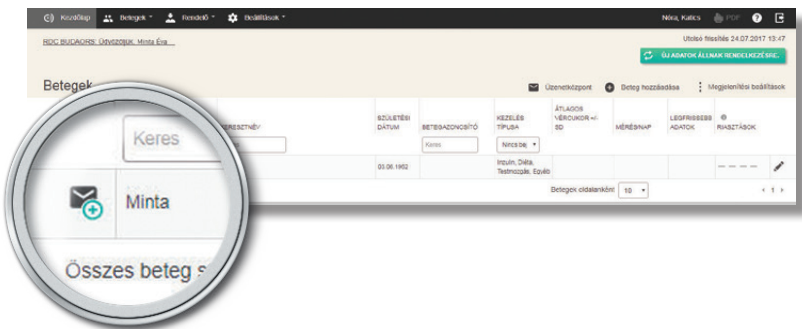




## Kapcsolódjon pácienseihez

### 2. Páciens adatmegosztási kérelmének elfogadása


A páciensek küldhetnek adatmegosztási kérelmet, ha megadják a Rendelői fiók nevét, ami a főoldal tetején jelenik meg.

**Az új kérelmek megtekintéséhez** kattintson a főoldal tetején található kérelmekre (vagy a *Páciens » Adatmegosztási Kérelem*-re a felső menüsorban).

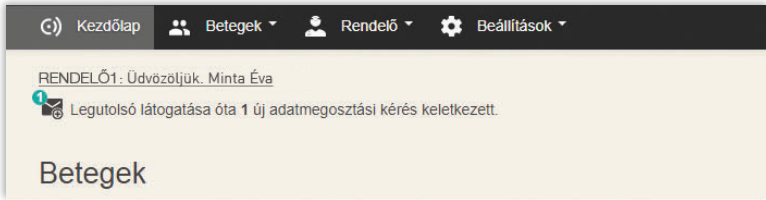

#### Adatmegosztási kérelem egy új betegtől:

1. Kattintson a *Páciens Hozzáadása* gombra.
2. Adja meg a páciens adatait
3. *Mentés*
4. Az összekapcsoláshoz kattintson a *nyílra*.

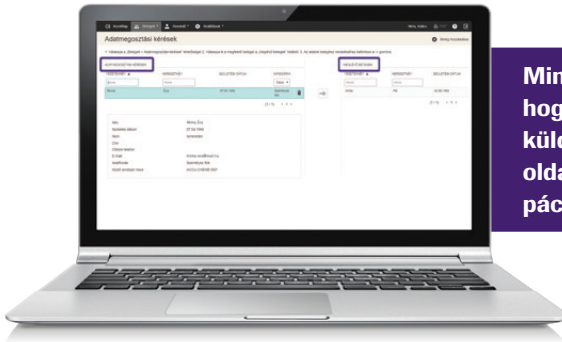

**Mindig ellenőrizze, hogy a bal oldalon kérelmet küldő páciens a jobb oldalon a megfelelő pácienshez kapcsolja.**

#### Adatmegosztási kérelem létező páciensről:

1. Kattintson a páciens nevére a létező páciensek között
2. Kattintson a nyílra az összekapcsoláshoz

**További információért és a bemutató videóért keresse fel az [accu-chekconnect.com](http://accu-chekconnect.com) oldalt.**




## Beteg adatok átvitele Accu-Chek eszközökről az Accu-Chek Connect Online fiókjába

Telepítse az *Eszköz Telepítő* szoftvert, ha a páciens Accu-Chek vércukormérő eszközéről, vagy inzulinpumpájáról szeretne adatot letölteni.

### 1. Eszköz Telepítő szoftver telepítése

1. Lépjen be a fiókjába.
2. Páciensek » *Kapcsolatok kezelése*.
3. Kattintson a rendszernek megfelelő telepítőre és kövesse a képernyőn látható utasításokat.



*Megjegyzés:*  
Megtekintheti és módosíthatja a beállításokat, ha az Eszköz Telepítő ikonra  kattint a jobb érgéggel.

### 2. Adatátvitel

1. Csatlakoztasson egy Accu-Chek eszközt és kezdje meg az adatátvitelt.
2. Az *Eszköz Beállításnál* adja meg az Accu-Chek Connect Online Rendelői fiók nevét és jelszavát az eszköz fiókhoz való kapcsolásához (csak az első adatátvitelnél szükséges).





## Beteg adatok átvitele Accu-Chek eszközökről az Accu-Chek Connect Online fiókjába

### 3. Eszköz kapcsolása pácienshez

1. Az Accu-Chek Connect Online fiókban menjen a *Páciens* » *Eszközök* menübe.
2. A Létező Páciensek menüben válassza ki a páciens, akihez eszközt kapcsol.

**Megjegyzés:** Ha a páciens nem szerepel a listán, kattintson a *Páciens Hozzáadása* gombra . Hozzáadás után válassza ki az eszközt, amit az új pácienshez szeretne kapcsolni.

3. Kattintson az adatok elfogadására .
4. Kattintson: *Igen, adatok összekapcsolása*.

The screenshot shows the 'Készülékek' (Devices) section of the Accu-Chek Connect Online interface. It includes a table of devices, a patient selection form, and a confirmation dialog for linking the device to a patient.

**Készülékek**

1. Válasszon készüléket. 2. Válassza ki a megfelelő beteget. 3. A készülék beteghez rendeléséhez kattintson a – gombra.

ŰRHÉSZLÉK

| KÉSZÜLÉKNÉV        | SOROZATSZÁM | RÖVID NÉV (TÁRSÍTÁS NÉVE)                   |
|--------------------|-------------|---|
| ACCU-CHEK Performa | 21059077    | ACCU-CHEK Performa-21059077-RBSMWDIAMESZARO |

(1 / 1) < 1 >

**VIDEÓ-Ö BETTEK**

VEZETŐNÉV: [ ] HENDEZŐNÉV: [ ] SZÜLETÉS DÁTUM: [ ]

Név: [ ]

Minta: Éva Születési dátum: 1989.04.07

(1 / 1) < 1 >

Név: Minta Éva  
Születési dátum: 1989.04.07  
Cím: [ ]  
Otthoni telefon: [ ]  
E-mail: [ ]  
Betegazonosító: [ ]

**KÉSZÜLÉK HOZZÁKAPCSOLÁSA BETEGREKORDHOZ**

Készülék hozzákapcsolásának megerősítése

| A KÉSZÜLÉK ADATAI         |   | BETEG ADATAI    |            |
|---------------------------|---|-----------------|------------|
| Készülékmodell            | ACCU-CHEK Performa                          | Név             | Minta Éva  |
| Sorozatszám               | 21059077                                    | Születési dátum | 1989.04.07 |
| Rövid név (társítás neve) | ACCU-CHEK Performa-21059077-RBSMWDIAMESZARO | Nem             | [ ]        |
|                           |   | Cím             | [ ]        |
|                           |   | Otthoni telefon | [ ]        |


MÉGSE IGEN, KAPCSOLJA HOZZÁ AZ ADATOKAT

## Gyors adatátvitel

Adatátvitel bármilyen Accu-Chek vércukormérő eszköztől, vagy inzulinpumpáról az Accu-Chek Connect Online fiókjába.

Accu-Chek Performa  
vércukormérő



A kikapcsolt eszközön egyszerre tartva nyomva a gombokat , amíg két nyíl jelenik meg a képernyőn.



Accu-Chek Spirit Combo  
inzulinpumpa és  
Accu-Chek Performa  
Combo távirányító



**Accu-Chek Spirit Combo:**  
Állítsa STOP üzemmódba pumpáját. Menjen az *Adatátvitel* menüpontba és indítsa el az adatforgalmat.



**Accu-Chek Performa Combo:**  
Kapcsolja be a készülékét. Menjen a *Saját adatok*, majd az *Adatátvitel* menüpontba.



Accu-Chek Active  
vércukormérő\*



A kikapcsolt eszközt csatlakoztassa az USB kábelhez. Az adatátvitel alatt a PC jelenik meg a kijelzőn.



Egy Accu-Chek eszköz csatlakoztatásánál az Eszköz Telepítő szoftver legfeljebb 8 órán keresztül automatikusan fut a háttérben, hogy biztosítsa az adatátvitelt. A beállítások módosításához, pl. az alapértelmezett böngésző beállításához a jobb egérgombbal kattintson az Eszköz Telepítő ikonra és válassza ki a Beállítások menüpontot.

\* A korábbi (GG, GN, GC kezdetű sorozatszámúval rendelkező) Accu-Chek Active vércukormérőkhöz szükséges van az Accu-Chek Smart Pix eszközhöz. A kommunikáció elindításához nyomja hosszan az 'M' gombot!

Az Accu-Chek® Performa Combo, az Accu-Chek® Active és az Accu-Chek® Performa gyógyászati segédeszközök. Az Accu-Chek® Spirit Combo orvostechnikai eszköz státuszú gyógyászati segédeszköz. Az Accu-Chek® Smart Pix leadvasó készülék információi technológiai eszköz. Az Accu-Chek® Connect orvostechnikai eszköz.

# Az Accu-Chek Connect Online elérhető az alábbi weboldalon:

[www.accu-chekconnect.com](http://www.accu-chekconnect.com)



1. Accu-Chek Connect Online fiók létrehozása
2. Hívja meg pácienseit saját szakrendelői fiókjához, vagy fogadja el a páciensek adatmegosztási kérelmét
3. Az adatokat bármikor és bárhol megnézheti, elemezheti

1. Hinnen AD, et al., J Diabetes Sci Technol. 2015; 9:293-301.
2. Hirsch IB., Endocr Pract. 2004;10:67-76.
3. Kazlauskaitė R, et al., Diabetes Technol Ther. 2009;11:385-392.
4. Given JE, et al., Diabet Med. 2013;30:901-913.

Bővebb információ:

[www.vercukormeres.hu](http://www.vercukormeres.hu)

**06 (80) 200-694** (ingyenesen hívható zöldszám)



**Roche Magyarország Kft.**  
2040 Budaörs, Edison u. 1.

**ACCU-CHEK®**

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK CONNECT, ACCU-CHEK PERFORMA, ACCU-CHEK ACTIVE, ACCU-CHEK SPIRIT COMBO, ACCU-CHEK PERFORMA COMBO  
ÉS ACCU-CHEK SMART PIX a Roche bejegyzett védjegyei.

ACCUCHEKPOS2018/01V